



KOD KATALOGOWY	OKG-24
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL	OKG-24
CODE	OKG-24
TRADE NAME	UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL	OKG-24

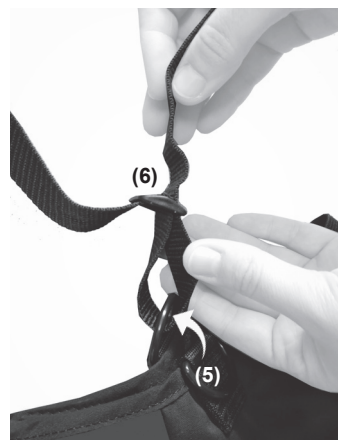


**1. PL:** Odepnij klamrę zatrzaskową (1) i załóż temblak na rękę w taki sposób aby łokiec znajdował się w otworze (2), a kończyna ustawiona była pod odpowiednim kątem.

**EN:** Unfasten the snap buckle (1) and put on the arm sling in such a way that the elbow is in the hole (2), and the limb is at the right angle.

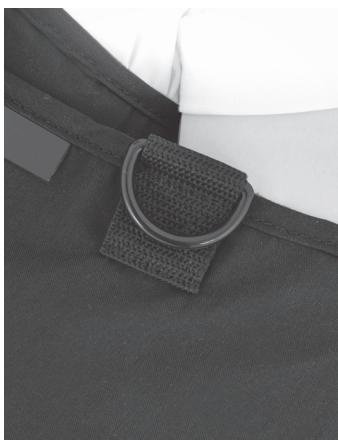


**2. PL:** Zwróć uwagę na to, aby pasek (3) zawsze by przypięty do wewnętrznej klamki wyrobu, znajdującej się pomiędzy ramieniem, a klatką piersiową. Jeśli istnieje potrzeba przełożenia paska, wyplec taśmę z pół-kółka (4) przekładając ją na przeciwne półkółko (5) i przepleć taśmę przez regulator (6).

**EN:** Make sure that the strap (3) is always fastened to the inner buckle of the product, located between the arm and the chest. If there is a need to change the strap, weave the strap from the half-circle (4) by moving it to the opposite half-circle (5) and thread the strap through the adjuster (6). The limb was set at the right angle.

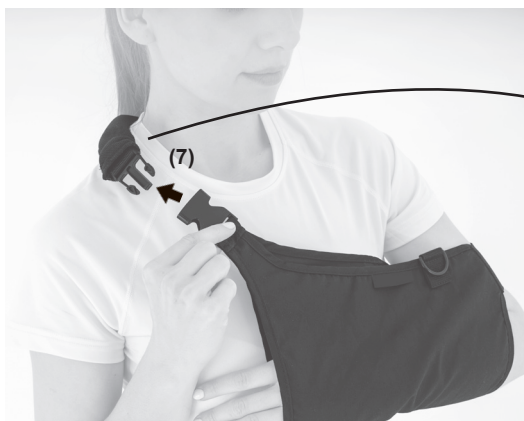

**3. PL:** Przełóż pasek przez ramię, zapnij temblak na klamerkę (7) i ustaw osłonę szyi (8) w odpowiednim miejscu, osłaniając nią klamerkę.

**EN:** Pass the strap over your shoulder, fasten the sling with the buckle (7) and position the neck cover (8) in the right place, covering the buckle with it.

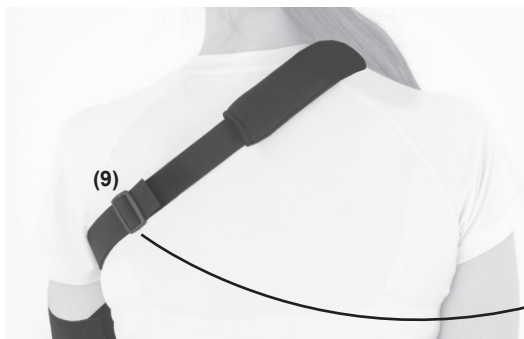

**4. PL:** Jeśli istnieje potrzeba, dopasuj długość taśmy za pomocą regulatora (9).

**EN:** If necessary, adjust the length of the strap with the adjuster (9).



**5. PL:** Gotowy wyrób.

**EN:** Product is ready to use.