


KOD KATALOGOWY	FREMI PRO
NAZWA HANDLOWA	ORTEZA ODWODZĄCA STAWY BIODROWE FREMI PRO Z UNOSZENIEM KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL	
CODE	FREMI PRO
TRADE NAME	HIP JOINT ABDUCTION ORTHOSIS FREMI PRO WITH LOWER LIMB ELEVATION
MODEL	




(A) Klin odwodzący / Abduction wedge
(B) Pasy stabilizujące / Stabilizing straps
(C) Osłona pokrętki / Knob cover



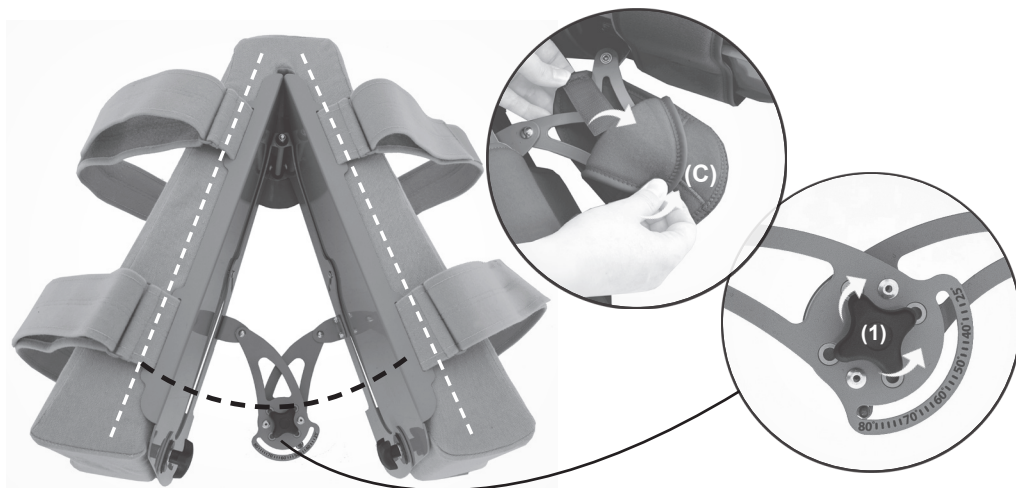


1. PL: Przed umieszczeniem klina pomiędzy kończynami, należy zdjąć osłonę pokrętki (C) i ustawić pożądany kąt odwiedzenia (25-80°), według wskazań określonych przez lekarza prowadzącego. Regulacji dokonujemy przy pomocy pokrętki blokującej (1).

EN: Before placing the wedge between the limbs, remove the knob cover (C) and set the desired abduction angle (25-80°), according to the indications specified by the attending physician. Adjustment is made using the locking knob (1).

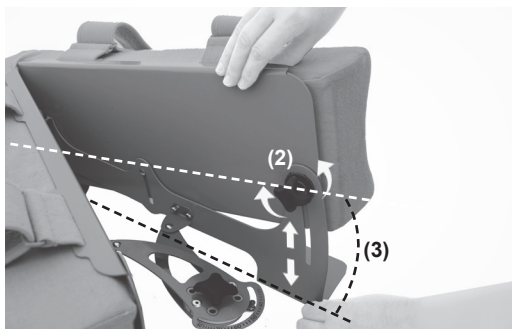

- 2. PL:** Poluzuj pokrętkę (2) i ustaw pożądaną wysokość uniesienia kończyn/kończyny (3).
EN: Loosen the knobs (2) and set the desired elevation height of the limb(s) (3).

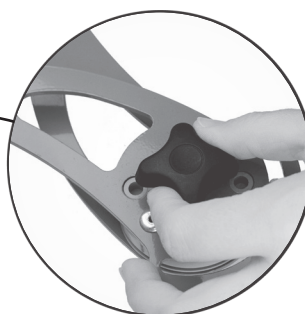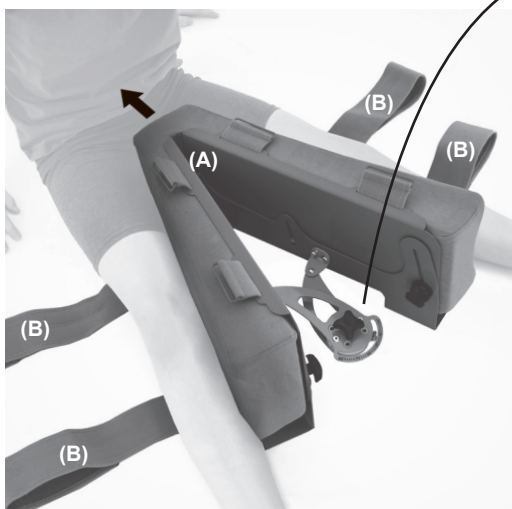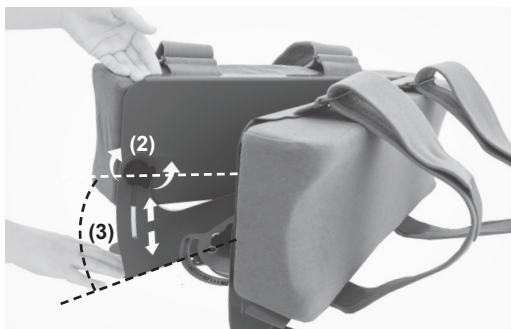


- 3. PL:** Rozepnij pasy stabilizujące (B). Upewnij się, że ustawiony wcześniej kąt odwiedzenia i uniesienia kończyn/kończyny jest zablokowany. Następnie wsuń ortezę (A) pomiędzy kończyny dolne. Zaleca się ustawienie klina odwodzącego jak najbliżej spojenia łonowego, między kończynami dolnymi.

- EN:** Unfasten the stabilizing straps (B). Ensure that the previously set abduction and elevation angles of the limb(s) are locked. Then slide the brace (A) between your lower limbs. It is recommended to place the abduction wedge as close as possible to the pubic symphysis, between the lower limbs.




UWAGA!
ATTENTION!

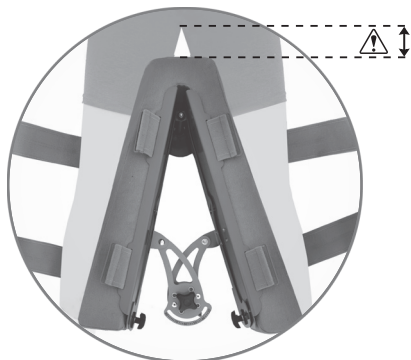


- PL:** Obniżenie wierzchołka wyrobu w stosunku do spojenia łonowego zmienia oczekiwany kąt odwiedzenia kończyn dolnych.

- EN:** Lowering the top of the product in relation to the pubic symphysis changes the expected angle of abduction of the lower limbs.

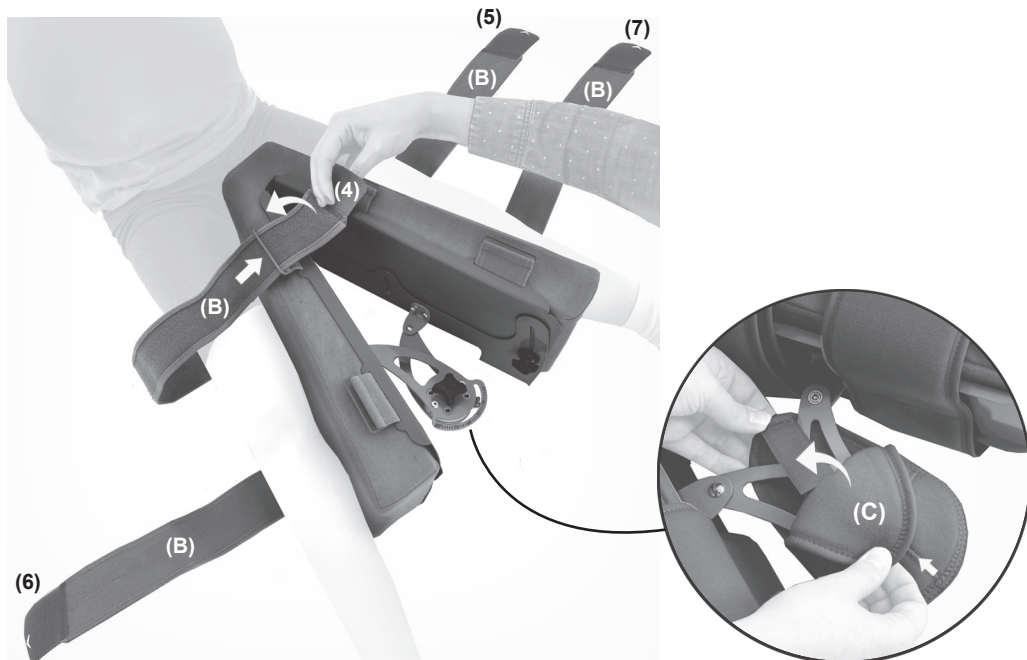

4. PL: Przepleć taśmy przez klamry i zapnij pasy stabilizujące (B) na rzepy w podanej kolejności (4,5,6,7). Zapnij na rzep osłonę pokręta (C).

EN: Interlace the straps through the buckles and fasten the stabilizing straps (B) with Velcro in the given order (4,5,6,7). Fasten the knob cover (C) using the Velcro.

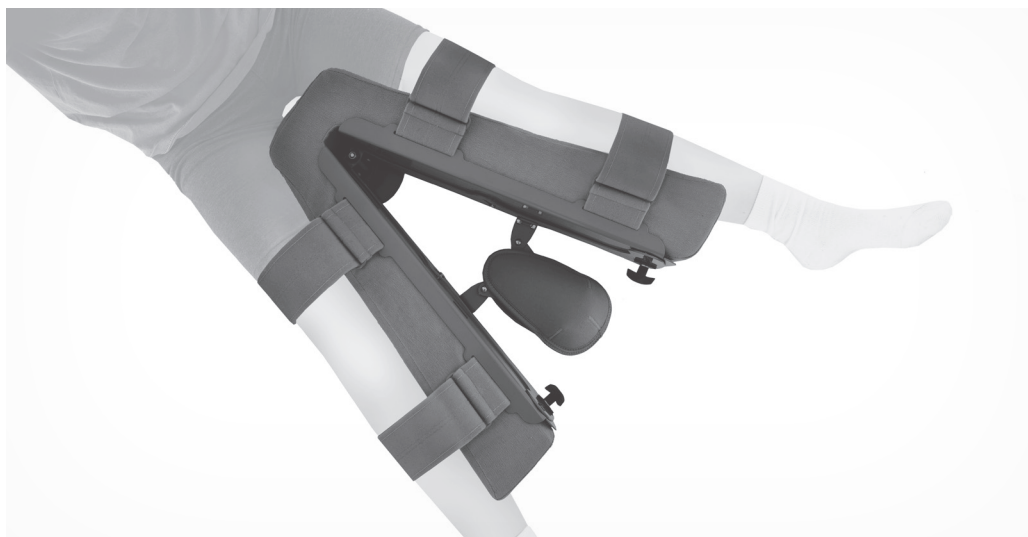

5. PL: Gotowy wyrób.

EN: The product is ready to use.